


# Cicatridina<sup>®</sup>

## spray

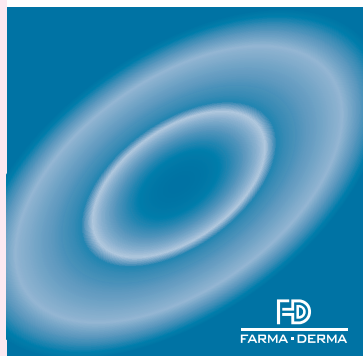

FD  
FARMA-DERMA

**COMPOSIZIONE:** acido ialuronico sale sodico 0,2 mg/g, amido octenilsuccinato di alluminio, esametildiossano, olio di mandorle dolci, vitamina E acetato, acido ximeninico, limone o.e., melaleuca o.e., butano, isobutano, propano.  
**INDICAZIONI:** CICATRIDINA spray, favorendo il ripristino delle fisiologiche condizioni della cute, è indicato come trattamento coadiuvante dei processi riparativi delle ferite superficiali e profonde (abrasioni, lacerazioni, ustioni di I e II grado, ferite chirurgiche, piaghe da decubito ed ulcere). **MODALITÀ D'USO:** si consiglia un'accurata detersione della parte da trattare prima di ogni applicazione. ● **Prima di ogni erogazione, per favorire la miscelazione della polvere, agitare bene sino a sentire il rumore della sfera posta all'interno del flacone.** Adulti e bambini: vaporizzare con il flacone in posizione verticale ad una distanza di 10-15 cm curando che il getto sia diretto sulla parte da trattare. Ripetere l'operazione 2 o 3 volte al giorno o secondo prescrizione medica. Se necessario CICATRIDINA spray può essere utilizzato per periodi prolungati, in ogni caso dopo 30 giorni di utilizzo continuativo sospendere il trattamento e consultare il medico. **EFFETTI INDESIDERATI:** l'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, o qualora si riscontrassero altri effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare il proprio medico o il farmacista. **CONTROINDICAZIONI:** non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto. **INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI:** non sono note interazioni con altri prodotti, pertanto è consigliabile consultare il medico prima di utilizzare CICATRIDINA spray in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci ad uso topico. **DISPOSIZIONI PER I DISPOSITIVI MEDICI DA REGOLAMENTO UE 2017/745:** è necessario segnalare al fabbricante qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al seguente indirizzo email: [quality@farmaderma.it](mailto:quality@farmaderma.it). Tale segnalazione deve inoltre essere effettuata all'autorità competente dello Stato membro in cui si risiede.



**AVVERTENZE E PRECAUZIONI:** Attenzione. Aerosol infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. In caso di gravidanza o allattamento, non essendo stati effettuati studi clinici specifici, consultare il medico prima dell'utilizzo del dispositivo. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata.

Per lo smaltimento del dispositivo medico scaduto o non più utilizzato verifica le disposizioni del tuo Comune.

#### SMALTIMENTO IMBALLAGGI VUOTI:

Bombola con valvola (ALU 41): alluminio.	Erogatore e tappo (PP 5): plastica.
Conferisci gli imballaggi in raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.	

Data di emissione ultima versione delle istruzioni per l'uso: 11/2022.

**DISPOSITIVO MEDICO**  **0477**

 **Fabbricante: FARMA-DERMA s.r.l.**  
 Via dell'Artigiano 6-8 - 40010 Sala Bolognese (BO) - ITALIA  
 Per segnalazioni: [www.farmaderma.it](http://www.farmaderma.it) (Contatti/Assicurazione Qualità)

125 ml e

**175 3**

IT 1005 P REV 04



A 901648764