

Leggete con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore. Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica. Tuttavia, per raggiungere una migliore efficacia, deve essere usato secondo le indicazioni descritte.

- Conservate il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.
- Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgetevi al vostro medico e/o farmacista.
- Se la sintomatologia persiste dopo un certo periodo di tempo, consultate il medico.

Cicatridina[®]

unguento nasale

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico sale sodico, centella asiatica, calendula, aloe vera, olio di mandorle dolci, BHT, vitamina E acetato, glicole propilenico, vaselina bianca, olio di vaselina, olio di ricino, cera carnauba, benzalconio cloruro.

COME SI PRESENTA

La confezione contiene un tubo da 15 g e.

CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

CICATRIDINA è un unguento a base di acido ialuronico che aderisce alla mucosa nasale formando un film che protegge dagli agenti esterni e dai patogeni.

L'acido ialuronico, trattenendo l'acqua fisiologicamente presente, idrata e favorisce i naturali processi di riparazione tissutale.

Inoltre, grazie alla presenza di estratti vegetali e olio di mandorle dolci, CICATRIDINA svolge un'azione lubrificante ed emolliente che dona sollievo alla mucosa secca ed irritata.

INDICAZIONI

Trattamento lubrificante ed emolliente per il mantenimento dell'idratazione della mucosa nasale nei casi di secchezza ed irritazione, anche in presenza di croste, dovuti a:

- particolari condizioni ambientali;
- trattamenti farmacologici;
- patologie quali riniti e/o sinusiti.

Coadiuvata inoltre i naturali processi di riepitelizzazione e riparazione della mucosa nasale a seguito di interventi chirurgici, lesioni superficiali ed epistassi, e svolge un'azione protettiva e idratante che previene la formazione di croste.

Indicato anche nei casi di secchezza ed irritazione della zona perinasale.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

Gravidanza e allattamento

In tali circostanze si consiglia di consultare il proprio medico.

INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

Si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare il prodotto in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci ad uso nasale.

COME DEVE ESSERE UTILIZZATO

Lavarsi le mani prima dell'utilizzo del dispositivo medico.

Dosare un'adeguata quantità di prodotto sul dito in funzione delle dimensioni dell'area da trattare e applicare delicatamente un sottile strato di unguento all'interno della narice e/o nella zona perinasale.

QUANDO E PER QUANTO TEMPO

Adulti e bambini: effettuare 2-3 applicazioni al giorno o secondo prescrizione medica. La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi.

CICATRIDINA unguento nasale può essere utilizzato in qualunque momento della giornata.

EFFETTI INDESIDERATI

L'uso, specie se prolungato, potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione e irritazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. Qualora si riscontrassero altri effetti indesiderati, informare il proprio medico o il farmacista.

AVVERTENZE

Non somministrare ai bambini di età inferiore a 3 anni. Il trattamento nei bambini deve essere fatto sotto la supervisione di un adulto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire.

SCADENZA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare il dispositivo medico ben chiuso, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal calore. Chiedere al farmacista come smaltire il dispositivo medico scaduto o non più utilizzato.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti:

Astuccio (PAP 21) e foglio illustrativo (PAP 22): Raccolta carta.

Tubo (ALU 41): Raccolta alluminio.

Tappo (PP 5): Raccolta plastica.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSITIVO MEDICO € 1282



Fabbricante:

FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

Per segnalazioni: www.farmaderma.it (Contatti/Assicurazione Qualità)