

- Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica.
- Leggere con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore.
- Conservare il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.
- Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgersi al proprio medico e/o farmacista.
- Se la sintomatologia persiste dopo un certo periodo di tempo, consultare il medico.

Ginexid[®]

clx

OVULI VAGINALI

COMPOSIZIONE

Gliceridi semi-sintetici, hamamelis e. lipolico, camomilla e. lipolico, vitamina E acetato, clorexidina digluconato.

COME SI PRESENTA

GINEXID si presenta in forma di ovuli per uso vaginale. La confezione è da 10 ovuli da 2 g.

CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

L'apparato genitale femminile è un organo esposto a contatti interno-esterno e, quindi, anche a possibili attacchi batterici. Le difese naturali sono costituite dalla microflora batterica presente in vagina, costituita per più del 90% dal genere *Lactobacillus*. L'equilibrio su cui si basa la flora batterica vaginale può alterarsi (stress fisici ed emotivi, attività sessuale, contraccettivi, terapie mediche, ecc) ed il tratto vulvo-vaginale può essere colonizzato da batteri patogeni che sono causa di irritazioni ed infezioni.

INDICAZIONI

GINEXID ovuli vaginali è indicato nell'igiene intima femminile per la sua azione lenitiva, protettiva e riequilibrante. L'associazione di sostanze di origine naturale aiuta a prevenire e/o ridurre gli stati flogistici vaginali.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

Gravidanza e allattamento


In tali circostanze, si consiglia di consultare il proprio medico.

INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

Non sono note interazioni con altri prodotti, pertanto è consigliabile consultare il medico prima di utilizzare GINEXID ovuli vaginali in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci ad uso vaginale.

COME DEVE ESSERE UTILIZZATO

Prelevare l'ovulo tirando le due alette del blister pretagliato ed inserirlo profondamente in vagina. Lavarsi le mani prima e dopo l'uso del dispositivo medico.

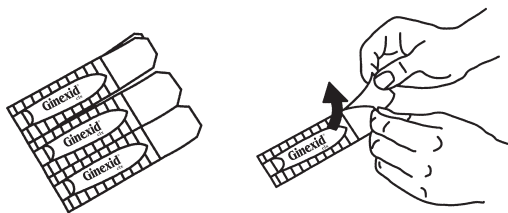

QUANDO E PER QUANTO TEMPO

Utilizzare un ovulo alla sera o secondo prescrizione medica. La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi; se necessario GINEXID ovuli vaginali può essere utilizzato per periodi prolungati.

EFFETTI INDESIDERATI

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. Qualora si riscontrassero effetti indesiderati descritti e non nel presente foglio illustrativo, informare il proprio medico o il farmacista.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire.

SCADENZA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

La data di scadenza è indicata sulla confezione e si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare il dispositivo medico ben chiuso, al riparo dalla luce e dal calore, preferibilmente ad una temperatura compresa tra 4 °C e 25 °C. Chiedere al farmacista come smaltire il dispositivo medico scaduto o non più utilizzato.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti:

- Astuccio (**PAP 21**) e foglio illustrativo (**PAP 22**): Raccolta carta.
- Blister (**7**): Raccolta plastica.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSITIVO MEDICO

Data di emissione ultima versione delle istruzioni per l'uso: aprile 2021.

 **Fabbricante:**
FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

Per segnalazioni: www.farmaderma.it (Contatti/Assicurazione Qualità)