



Leggete con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore. Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica. Tuttavia, per raggiungere una migliore efficacia, deve essere usato secondo le indicazioni descritte.

- Conservate il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.
- Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgetevi al vostro medico e/o farmacista.
- Se la sintomatologia persiste dopo un certo periodo di tempo, consultate il medico.

# IALOCLEAN®

## SOLUZIONE STERILE DA NEBULIZZARE a base di acido ialuronico ad alto peso molecolare

### COMPOSIZIONE

Acido ialuronico sale sodico, estratto di camomilla, EDTA, N-acetilcisteina, sodio cloruro, sodio idrossido, sodio fosfato monobasico biidrato, sodio fosfato bibasico eptaidrato, acqua.

### COME SI PRESENTA

IALOCLEAN si presenta in forma di soluzione sterile da nebulizzare. La confezione contiene 15 contenitori monodose da 2 ml.

### CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

IALOCLEAN è una soluzione sterile da nebulizzare a base di acido ialuronico ad alto peso molecolare, ottenuto per via biotecnologica e quindi privo di OGM e proteine di origine animale. L'acido ialuronico esercita un effetto protettivo e di barriera nei confronti della mucosa rino-oro-faringea soggetta ad arrossamenti ed infezioni. Esso infatti aderisce sulla superficie della mucosa e, trattenendo l'acqua fisiologicamente presente, forma una pellicola protettiva che dona sollievo alla mucosa irritata. L'azione lubrificante ed emolliente permette di alleviare tutti quei sintomi legati all'infiammazione quali la deglutizione difficoltosa, la sensazione di corpo estraneo in gola, di solletico o di secchezza. Infine l'effetto barriera consente di conservare l'integrità della mucosa proteggendola da agenti esterni nocivi e dai patogeni.

### INDICAZIONI

IALOCLEAN soluzione da nebulizzare è indicato nel trattamento coadiuvante delle affezioni delle vie respiratorie quali: tonsilliti, laringiti, faringiti, riniti, tracheo-bronchiti e bronchiti, sia in fase acuta che cronica; raucedine; flogosi delle corde vocali con e senza disfonia; tosse di natura irritativa, post-virale o da inquinanti ambientali; sindromi influenzali o da raffreddamento; postumi operatorii in ORL; esiti di manifestazioni extraesofagee da reflusso gastrico a carico delle alte vie respiratorie (disfagia, laringiti e faringiti croniche, afonia, tosse stizzosa).

### QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

IALOCLEAN soluzione da nebulizzare è controindicato all'uso nei bambini di età inferiore ai due anni. Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

#### *Gravidanza e allattamento*

In tali circostanze è opportuno consultare il proprio medico.

### INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

Non sono note interazioni con altri prodotti. È possibile utilizzare IALOCLEAN soluzione da nebulizzare in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci dopo consiglio medico.

## COME DEVE ESSERE UTILIZZATO

### Dose, modo e tempo di somministrazione

Adulti e bambini di età superiore ai 6 anni: un contenitore monodose per seduta 2 volte al giorno.


Bambini di età 2-6 anni: metà contenuto di un contenitore monodose per seduta 2 volte al giorno. Il contenitore reca una graduazione corrispondente a metà dose. Non superare le dosi consigliate. Somministrare la soluzione mediante gli apparecchi per aerosol terapia (esclusivamente a pistone e non ad ultrasuoni).

### Istruzioni per l'uso del contenitore monodose

Lavarsi le mani ed effettuare le seguenti operazioni:

1. Flettere il contenitore monodose nelle due direzioni e staccarlo dalla striscia cui è saldato.
2. Agitare leggermente il contenitore monodose prima dell'uso.
3. Aprire il contenitore monodose ruotando l'aletta.
4. Esercitando una moderata pressione sulle pareti del contenitore monodose, far uscire la soluzione secondo la quantità indicata ed immetterla nell'ampolla del nebulizzatore.
5. In caso di utilizzo di metà dose, il contenitore può essere richiuso capovolgendo e premendo il tappo. Il contenitore monodose richiuso deve essere conservato a temperatura compresa fra 2°C e 8°C (in frigorifero) e la quantità rimasta deve essere utilizzata entro 24 ore dall'apertura.

Aggiungere soluzione fisiologica nel rapporto 1:1.

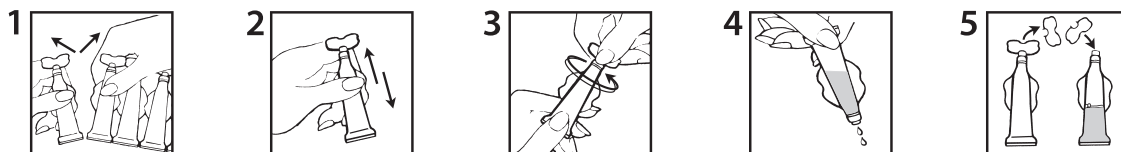

### QUANDO E PER QUANTO TEMPO

IALOCLEAN soluzione da nebulizzare si può utilizzare in qualunque momento della giornata senza particolari restrizioni di tempo ed orari. La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi; se necessario ai fini del miglioramento dei sintomi, IALOCLEAN soluzione da nebulizzare può essere assunto per periodi prolungati.

### EFFETTI INDESIDERATI

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. Qualora si riscontrassero altri effetti indesiderati informare il proprio medico o il farmacista.

### AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. L'eventuale presenza di un odore sulfureo non indica alterazioni del preparato ma è propria di un componente della formulazione.

### SCADENZA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. I contenitori monodose devono essere conservati dentro la busta di protezione, al riparo dalla luce e dal calore. In caso di utilizzo di metà dose, il contenitore monodose richiuso va conservato a temperatura compresa fra 2°C e 8°C (in frigorifero) e la quantità rimasta deve essere utilizzata entro 24 ore dall'apertura. Chiedere al farmacista come smaltire il dispositivo medico scaduto o non più utilizzato.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti:

Astuccio (PAP 21) e foglio illustrativo (PAP 22): Raccolta carta.

Contenitore monodose (LDPE 4) e busta (90 C/LDPE): Raccolta plastica.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSITIVO MEDICO **CE** 0373



**Fab**bricante: **FARMA-DERMA s.r.l.** – Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

Per segnalazioni: [www.farmaderma.it](http://www.farmaderma.it) (Contatti/Assicurazione Qualità)