

F

- Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica.
- Leggere con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore.
- Conservare il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza. Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgersi al proprio medico e/o farmacista.

MICOSTOP[®]

lavanda vaginale

COMPOSIZIONE

Acqua, glicerina, olio di ricino idrogenato (40)OE, clorexidina digluconato, sodio benzoato, acido borico, acido lattico, o.e. lavanda, clotrimazolo, acido 18-β-glicirretico.

COME SI PRESENTA

La confezione di MICOSTOP lavanda vaginale contiene 5 flaconi monouso in PE da 100 ml con 5 cannule monouso.

CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

La normale microflora batterica presente in vagina costituisce una difesa naturale ed efficace. Nel soggetto adulto la terapia antibiotica, lo stress, gli sbilanci dietetici e le malattie alterano nella qualità e nella quantità la benefica flora microbica vaginale esponendo le mucose vaginali all'attacco dei patogeni, causa di irritazioni e infezioni.

INDICAZIONI

Complemento igienico in associazione a medicazioni vaginali per vaginiti di natura micotica, batterica, protozoaria.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

Gravidanza e allattamento

In tali circostanze si consiglia di consultare il proprio medico.

Effetti sulla capacità di condurre veicoli e utilizzare attrezzi o macchine

Non sono necessarie particolari precauzioni.

INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

Non sono note interazioni con altri prodotti, pertanto è consigliabile consultare il medico prima di utilizzare MICOSTOP lavanda vaginale in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci ad uso vaginale.

R

COME DEVE ESSERE UTILIZZATO

Ogni flacone contiene una dose già pronta per una irrigazione. Lavarsi le mani prima di utilizzare il dispositivo medico. Ruotare la parte superiore del tappo a farfalla sino alla rottura e inserire la cannula sul tappo del flacone, esercitando una leggera pressione. Assumere una posizione confortevole (seduti sul bidet o sul WC o leggermente distesi) e introdurre delicatamente 3-4 cm della cannula in vagina. Non inserire la cannula in profondità. Premere lentamente il flacone (preferibilmente capovolto) e far defluire gradualmente tutta la soluzione all'interno della vagina. Al termine della lavanda non risciacquare. Non riutilizzare il flacone e la cannula dopo l'uso e smaltirli. Si raccomanda di fare un uso personale del dispositivo medico.

QUANDO E PER QUANTO TEMPO

Utilizzare una lavanda al giorno o secondo prescrizione medica. La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi.

EFFETTI INDESIDERATI

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dar origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. Qualora si riscontrassero altri effetti indesiderati informare il proprio medico o il farmacista.

AVVERTENZE

Un'irrigazione violenta o un inserimento troppo in profondità della cannula potrebbe causare il passaggio della cannula e/o della soluzione oltre il canale vaginale e in alcuni casi provocare una reazione vagale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire.

SCADENZA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata.

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal calore. Chiedere al farmacista come smaltire il dispositivo medico scaduto o non più utilizzato.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti:

- Astuccio (PAP 21) e foglio illustrativo (PAP 22): Raccolta carta.

- Flacone (LDPE 4), tappo (HDPE 2), cannula (7) e involucro cannula (PP 5): Raccolta plastica.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSITIVO MEDICO 

 **Fabbricante:**

FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 - 40010 Sala Bolognese (BO) - ITALIA

Per segnalazioni: www.farmaderma.it (Contatti/Assicurazione Qualità)