

**Leggete con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore. Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica. Tuttavia, per raggiungere una migliore efficacia, deve essere usato secondo le indicazioni descritte.**

- **Conservate il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.**
- **Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgetevi al vostro medico e/o farmacista.**
- **Se la sintomatologia persiste dopo un certo periodo di tempo, consultate il medico.**

# MICOSTOP<sup>®</sup> PLUS

## crema vaginale ad azione rapida

### COMPOSIZIONE

Acqua, stearato di glicerile, PEG 100 stearato, acido borico, alcool cetilstearilico, esteri di acidi grassi, ciclopentasilossano, stearina vegetale, clorexidina digluconato, clotrimazolo, olio di silicone, trietanolamina, EDTA sale bisodico, carbomer, acido glicirretico fitosomale, acido lattico.

### COME SI PRESENTA

La confezione di MICOSTOP PLUS crema vaginale contiene un tubo da 30 g e con 6 applicatori monouso.

### CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

La normale microflora batterica presente in vagina costituisce una difesa naturale ed efficace. Nel soggetto adulto particolari condizioni (riduzione delle difese immunitarie, terapie antibiotiche e cortisoniche, alimentazione povera di vitamine e/o ricca di zuccheri e carboidrati, stress, uso di contraccettivi orali, biancheria intima troppo stretta e/o sintetica) possono alterare nella qualità e nella quantità la benefica flora microbica vaginale esponendo le mucose vaginali all'attacco dei patogeni, causa di irritazioni ed infezioni. L'infezione vaginale più diffusa è rappresentata dalla candidosi causata da funghi del genere Candida (di cui Candida albicans è il più comune). In condizioni normali la Candida è presente nell'ecosistema vaginale in equilibrio con le altre specie. Quando il fisiologico ecosistema vaginale viene alterato, questi funghi si replicano in maniera eccessiva portando allo sviluppo di candidosi. Per combattere la candidosi è utile riportare il pH vaginale a valori ottimali ripristinando la fisiologica microflora batterica e creando un ambiente ostile alla proliferazione dei miceti.

### INDICAZIONI

MICOSTOP PLUS crema vaginale è indicato come trattamento coadiuvante delle micosi vaginali. Svolge un'azione riequilibrante e normalizzante del pH vaginale utile a contrastare la colonizzazione degli agenti patogeni. Inoltre, grazie alla sua azione emolliente e lenitiva, attenua le fastidiose sensazioni di prurito e bruciore.

### QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

#### *Gravidanza e allattamento*

Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta e in caso siano in corso tentativi di indurla. Non utilizzare durante l'allattamento.

### INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

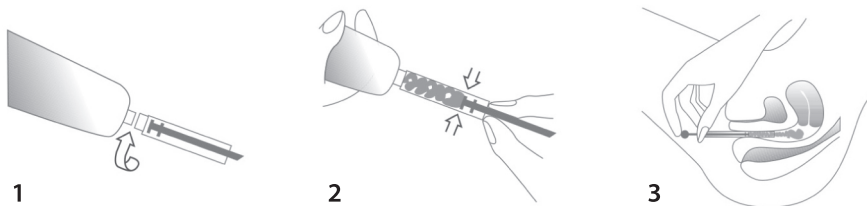
Non sono note interazioni con altri prodotti, pertanto è consigliabile consultare il medico prima di utilizzare MICOSTOP PLUS crema vaginale in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci ad uso vaginale.

**COME DEVE ESSERE UTILIZZATO**

MICOSTOP PLUS crema vaginale è inodore, non unge e non macchia la biancheria. Lavarsi le mani prima dell'utilizzo del dispositivo medico.

1. **Rompere il sigillo di chiusura del tubo utilizzando l'apposita punta posta sul tappo. Avvitare l'applicatore monouso sul collo del tubo.**
2. **Premere il tubo delicatamente dal fondo per far fuoriuscire la quantità di crema sufficiente a riempire l'applicatore sino al fermo.**
3. **Svitare dal tubo l'applicatore ed inserirlo delicatamente in vagina. Premere lo stantuffo fino a svuotare completamente l'applicatore. Al fine di facilitare l'introduzione ed il corretto svuotamento dell'applicatore, è opportuno compiere l'operazione stando sdraiate. Non riutilizzare l'applicatore dopo l'uso e smaltirlo.**

Si raccomanda di fare un uso personale del dispositivo medico.

**QUANDO E PER QUANTO TEMPO**

Applicare MICOSTOP PLUS crema vaginale una volta al giorno, preferibilmente alla sera prima di coricarsi, per 3 giorni consecutivi. In caso di necessità effettuare un secondo trattamento di 3 giorni. Se non si sono ottenuti risultati apprezzabili, consultare il medico.

**EFFETTI INDESIDERATI**

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. Nei casi in cui sia già presente il sintomo bruciore, con marcato eritema e/o irritazione, questo può risultare accentuato all'inizio del trattamento ma tende a scomparire spontaneamente con le successive applicazioni. Qualora si riscontrassero altri effetti indesiderati informare il proprio medico o il farmacista.

**AVVERTENZE**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire.

**SCADENZA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO**

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare il dispositivo medico ben chiuso, al riparo dalla luce e dal calore. Chiedere al farmacista come smaltire il dispositivo medico scaduto o non più utilizzato.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti:

- Astuccio (PAP 21) e foglio illustrativo (PAP 22): Raccolta carta.
- Tubo (ALU 41): Raccolta alluminio.
- Tappo (PP 5): Raccolta plastica.
- Applicatore (tubo LDPE 4 + stantuffo PP 5) e bustina (PP 5): Raccolta plastica.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSITIVO MEDICO **CE** 0373



**Fab**bricante: **FARMA-DERMA s.r.l.**

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

Per segnalazioni: [www.farmaderma.it](http://www.farmaderma.it) (Contatti/Assicurazione Qualità)