

Leggete con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore. Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica. Tuttavia, per raggiungere una migliore efficacia, deve essere usato secondo le indicazioni descritte.

- Conservate il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.
- Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgetevi al vostro medico e/o farmacista.
- Se la sintomatologia persiste dopo un certo periodo di tempo, consultate il medico.

PROXELAN[®]

supposte

COMPOSIZIONE

Semi di zucca, centella asiatica, boswellia, elicriso, vitamina E acetato, melaleuca alternifolia, acido ialuronico sale sodico, gliceridi semi-sintetici.

COME SI PRESENTA

PROXELAN supposte si presenta in forma di supposte per uso rettale. La confezione contiene 10 supposte da 2 g.

INDICAZIONI

PROXELAN supposte è indicato nel trattamento locale lenitivo ed emolliente del canale ano-rettale in presenza di fenomeni congestizi associati a prostatiti acute e croniche e ipertrofia prostatica benigna.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI


Non sono note interazioni con altri prodotti, pertanto è consigliabile consultare il medico prima di utilizzare PROXELAN supposte in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci ad uso rettale.

EFFETTI INDESIDERATI

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. Qualora si riscontrassero altri effetti indesiderati informare il proprio medico o il farmacista.

COME DEVE ESSERE UTILIZZATO

Prelevare la supposta tirando le due alette del blister pretagliato. Inserire la supposta per via rettale. Lavarsi le mani prima e dopo l'uso del dispositivo medico.

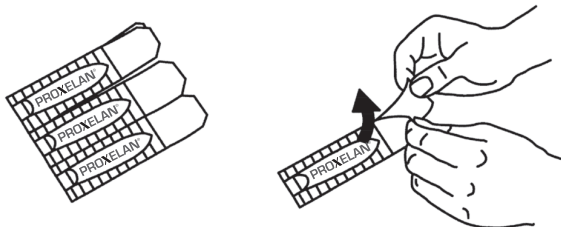

QUANDO E PER QUANTO TEMPO

Utilizzare una supposta al giorno, preferibilmente la sera prima di coricarsi, o secondo prescrizione medica. La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi; se necessario PROXELAN supposte può essere utilizzato per periodi prolungati.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire.

SCADENZA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare il dispositivo medico al riparo dalla luce e dal calore, preferibilmente ad una temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Chiedere al farmacista come eliminare i dispositivi medici non più utilizzati.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti:

- Astuccio (**PAP 21**) e foglio illustrativo (**PAP 22**): Raccolta carta.
- Blister (**7**): Raccolta plastica.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSITIVO MEDICO  **0373**

 **Fabbricante: FARMA-DERMA s.r.l.**
Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA
Distributore: Named® s.r.l.
Via Lega Lombarda, 33 - 20855 Lesmo (MB)

Per segnalazioni: www.farmaderma.it (Contatti/Assicurazione Qualità)