

- Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica.
- Leggere con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore.
- Conservare il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.
- Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgersi al proprio medico e/o farmacista.
- Se la sintomatologia persiste dopo un certo periodo di tempo, consultare il medico.

REFALGIN®

COMPRESSE FILMATE DEGLUTIBILI a rapida dissoluzione

COMPOSIZIONE

Acido alginico 365 mg, sodio alginato 300 mg, sodio bicarbonato, calcio carbonato, malto-destrina, sodio cloruro, cellulosa microcristallina, biossido di silicio, simeticone, grasso vegetale idrogenato, magnesio stearato, acqua. Filmatura: idrossipropilcellulosa.

SENZA GLUTINE

COME SI PRESENTA

REFALGIN si presenta in forma di compresse filmate deglutibili a rapida dissoluzione gastrica. La confezione contiene 20 compresse da 1,3 g.

CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

REFALGIN compresse è a base di alginato, un composto naturale che si ottiene dalle alghe marine. L'alginato blocca il reflusso in modo meccanico. Quando l'alginato arriva nello stomaco entra in contatto con gli acidi gastrici e forma un gel che galleggia sopra il contenuto dello stomaco. Questo gel funziona da "barriera antireflusso", si posiziona alla bocca dello stomaco e impedisce la risalita di materiale acido nell'esofago. Il gel viscoso, inoltre, aderendo alla parete dello stomaco, può svolgere un'azione protettiva della mucosa gastrica stessa.

INDICAZIONI

REFALGIN compresse è un dispositivo medico ad azione meccanica indicato nel trattamento del reflusso gastrico al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati quali: rigurgito acido, bruciore di stomaco, pirosi gastrica in gravidanza, cattiva digestione associata ad un reflusso dei contenuti gastrici, tosse, raucedine e flogosi rinofaringee. REFALGIN compresse può essere utilizzato durante un trattamento continuativo con farmaci antinfiammatori non steroidei come profilassi primaria della gastropatia da FANS.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

Gravidanza e allattamento

In tali circostanze si consiglia di consultare il proprio medico.

INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

Alcuni componenti di REFALGIN compresse possono interagire con l'attività di farmaci e altri prodotti ad uso orale interferendo con il loro assorbimento.

COME DEVE ESSERE UTILIZZATO

Assumere REFALGIN compresse almeno 2 ore prima o 2 ore dopo l'assunzione di farmaci o altri prodotti ad uso orale per non interferire con il loro assorbimento.

Deglutire 1-2 compresse dopo i pasti con un po' d'acqua. Lavarsi le mani prima dell'utilizzo del dispositivo medico.

La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi; se necessario REFALGIN compresse può essere assunto per periodi prolungati.

EFFETTI INDESIDERATI

Il dispositivo medico REFALGIN compresse è di solito ben tollerato poiché il suo meccanismo di azione è di tipo fisico/meccanico e non dipende da un assorbimento sistemico. Qualora si riscontrassero effetti indesiderati informare il proprio medico o il farmacista.

AVVERTENZE

Si raccomanda di consultare il medico prima di utilizzare REFALGIN compresse in associazione a farmaci o altri prodotti ad uso orale.

Consultare il medico o il farmacista in caso di assunzione di 4 o più compresse al giorno per un periodo prolungato, specialmente nel caso in cui si segua una dieta a basso contenuto di sale (sodio).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SCADENZA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare il dispositivo medico ben chiuso, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal calore. Chiedere al farmacista come smaltire il dispositivo medico scaduto o non più utilizzato.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti:

- Astuccio (PAP 21) e foglio illustrativo (PAP 22): Raccolta carta.
- Blister (C/PVC 90): Raccolta plastica.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSITIVO MEDICO 0373

Data di emissione ultima versione delle istruzioni per l'uso: febbraio 2021.



Fabbricante:

FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

Per segnalazioni: www.farmaderma.it (Contatti/Assicurazione Qualità)