

Leggete con attenzione l'intero foglio illustrativo: contiene informazioni importanti per il consumatore. Questo è un dispositivo medico ottenibile senza prescrizione medica. Tuttavia, per raggiungere una migliore efficacia, deve essere usato secondo le indicazioni descritte.

- Conservate il foglio illustrativo per poterlo consultare all'occorrenza.
- Per ulteriori informazioni o consigli, rivolgetevi al vostro medico e/o farmacista.
- Se la sintomatologia persiste dopo un certo periodo di tempo, consultate il medico.


# VITAGYN C®

## Crema vaginale a pH acido

### COMPOSIZIONE

Acqua, alcool cetilstearylco, glicerina, olio di mandorle dolci, alcool cetilstearylco etossilato, burro di karité, argento citrato e acido citrico, sodio ascorbil fosfato, vitamina E acetato, imidazolidinilurea, olio di silicone, acido lattico, sodio poliacrilato, maltodestrine, sodio idrosolfito, EDTA sale bisodico.

### COME SI PRESENTA

La confezione di VITAGYN C crema vaginale contiene un tubo da 30 g e con 6 applicatori monouso 

### CHE COSA È E PERCHÉ SI USA

Il ripristino di un pH vaginale acido compreso tra 3.8 e 4.4 inibisce la crescita dei microrganismi responsabili della vaginosi batterica e crea un ambiente sfavorevole alla colonizzazione batterica da parte dell'*E.Coli* e, quindi, alla ricorrenza delle infezioni urinarie. Inoltre, un pH vaginale acido neutralizza i fattori di virulenza del *Trichomonas vaginalis* e l'invasione della *Candida* nell'epitelio vaginale.

### INDICAZIONI

VITAGYN C crema vaginale è indicato come trattamento coadiuvante e nella prevenzione della vaginosi batterica e delle infezioni urinarie ricorrenti. Il suo utilizzo è utile soprattutto in soggetti recidivanti e dopo terapie farmacologiche antibiotiche. VITAGYN C crema vaginale ripristina e mantiene il fisiologico pH vaginale e favorisce la crescita della naturale flora lattobacillare. In tal modo previene l'instaurarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della vaginosi batterica, anche in corso di gravidanza.

### QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto.

#### *Gravidanza e allattamento*

VITAGYN C crema vaginale può essere utilizzato in gravidanza e durante l'allattamento sotto controllo medico.

### INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

Non sono note interazioni con altri prodotti, pertanto è consigliabile consultare il medico prima di utilizzare VITAGYN C crema vaginale in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci ad uso vaginale.

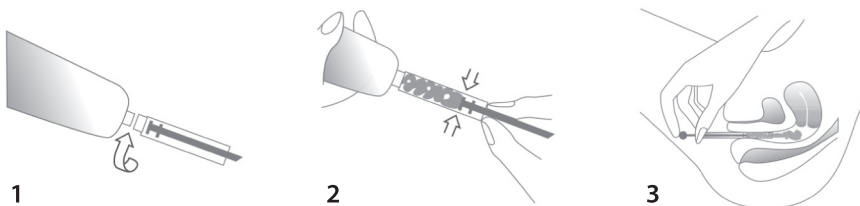
**COME DEVE ESSERE UTILIZZATO**

VITAGYN C crema vaginale è inodore, non unge e non macchia la biancheria.

Lavarsi le mani prima dell'utilizzo del dispositivo medico.

1. **Rompere il sigillo di chiusura del tubo utilizzando l'apposita punta posta sul tappo. Avvitare l'applicatore monouso sul collo del tubo.**
2. **Premere il tubo delicatamente dal fondo per far fuoriuscire la quantità di crema sufficiente a riempire l'applicatore sino al fermo.**
3. **Svitare dal tubo l'applicatore ed inserirlo delicatamente in vagina per 3-4 cm. Premere lo stantuffo fino a svuotare completamente l'applicatore. Al fine di facilitare l'introduzione ed il corretto svuotamento dell'applicatore, è opportuno compiere l'operazione stando sdraiate.**  
**Non riutilizzare l'applicatore dopo l'uso e smaltirlo.**

Si raccomanda di fare un uso personale del dispositivo medico.

**QUANDO E PER QUANTO TEMPO**

Applicare VITAGYN C crema vaginale una volta al giorno, preferibilmente alla sera prima di coricarsi, per 6 giorni consecutivi. Per il mantenimento 1-2 applicazioni la settimana per 12 settimane o più.

**EFFETTI INDESIDERATI**

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico potrebbe dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia. Qualora si riscontrassero altri effetti indesiderati informare il proprio medico o il farmacista.

**AVVERTENZE**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire.

**SCADENZA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO**

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. Conservare il dispositivo medico ben chiuso, al riparo dalla luce e dal calore. Chiedere al farmacista come smaltire il dispositivo medico scaduto o non più utilizzato.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti:

- Astuccio (PAP 21) e foglio illustrativo (PAP 22): Raccolta carta.
  - Tubo (ALU 41): Raccolta alluminio.
  - Tappo (PP 5): Raccolta plastica.
  - Applicatore (tubo LDPE 4 + stantuffo PP 5) e bustina (PP 5): Raccolta plastica.
- Verifica le disposizioni del tuo Comune.

DISPOSITIVO MEDICO  0373



**Fabbricante: FARMA-DERMA s.r.l.**

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA

Per segnalazioni: [www.farmaderma.it](http://www.farmaderma.it) (Contatti/Assicurazione Qualità)